

消毒

单次使用

说明
针板架

项目编号：9896-032-0354x



Invivo Corporation
3545 SW 47th Avenue
Gainesville, FL 32608-7691 U.S.A.
(352) 336-0010
www.invivocorp.com

简要说明：

针板架安装于下列 Invivo 乳腺线圈的网格固定板内：乳腺活检线圈 (BBC) 1.5 特斯拉和 3 特斯拉、带 MR-BI 160 的开放式乳腺线圈 (OBC)、带乳腺活检设备 (BBD) 的开放式乳腺线圈 (OBC)、带开放式乳腺活检设备 (OBD) 的开放式乳腺线圈 (OBC) 和冷光乳腺系统 (LBS) 1.5 特斯拉和 3 特斯拉。**针板架**可确保针板被牢牢固定。它可被用于单边、双边或中间干预。**针板架**经过伽马射线消毒，只能使用一次。



图 1：固定针板

应用： 针板架

将**针板架**推入针板旁边的网格单元，使针板架包住针板。当**针板架**卡到位之后，按下卡夹即可将其锁定；这可防止针板在针被拔出时出现松脱。为确保安全执行干预，还请遵守用户手册中的说明。

小心！

- 使用之前，请认真阅读说明，并检查无菌包装和器械是否完好无损。
- **针板架**是一种一次性设备，不得重复消毒，由于存在伤害和感染风险，使用后必须妥善处置。
- **针板架**只能由富有经验的医疗专业人员使用。



0123

欧盟授权代表：

GMB Authorized Representative Ltd.

The White House, 2 Meadow

Godalming, Surrey GE7 3HN United Kingdom

电话：+44(0) 7710 039 721

网址：www.mba-gbm.com

4598-009-71771

1/1

修订版本 1