

**Kurzbeschreibung:**

Der **Needle Block Holder** passt in die Grid Immobilization Plate folgender Invivo Brust Spulen: Breast Biopsy Coil (BBC) 1,5 Tesla und 3 Tesla, Open Breast Coil (OBC) mit MR-BI 160, Open Breast Coil (OBC) mit Breast Biopsy Device (BBD), Open Breast Coil (OBC) mit Open Breast Biopsy Device (OBD) und dem Luminescent Breast System (LBS) 1,5 Tesla und 3Tesla. Der **Needle Block Holder** garantiert eine sichere Befestigung des Needle Blocks. Er kann für unilaterale, bilaterale oder mediale Interventionen verwendet werden. Der **Needle Block Holder** ist gamma-sterilisiert und nur für den Einmalgebrauch bestimmt.



Abb. 1: Fixieren des Needle Blocks

**Anwendung: Needle Block Holder**

Schieben Sie den **Needle Block Holder** in ein Rasterfeld neben dem Needle Block so, dass der Halter den Needle Block umschließt. Nach der Platzierung des **Needle Block Holders** wird dieser durch Herunterdrücken der Lasche verriegelt, dieses verhindert ein Lösen des Needle Blocks beim Herausziehen der Nadel. Um eine Intervention sicher durchzuführen, beachten sie bitte ebenfalls die Anweisungen des Benutzer Handbuchs.

**Achtung!**

- Vor dem Einsatz Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen, sowie Sterilverpackung und Instrument auf einwandfreien Zustand überprüfen.
- Die **Needle Block Holder** ist ein Einmalprodukt, darf nicht resterilisiert werden und ist nach der Verwendung wegen der Verletzungs- und Infektionsgefahr ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Die **Needle Block Holder** ist nur von erfahrenem medizinischem Fachpersonal zu verwenden!